



Endo zestaw do czyszczenia



Instrukcja użytkowania

1. Wypełnij trzy pojemniki płynem do dezynfekcji i umieść je w trójkątnej podstawie.
2. Do jednego pojemnika wkładamy pilniki Gentlefile (1).
3. W kolejnym pojemniku umieszczamy ręczne pilniki (2).
4. Trzeci pojemnik jest przeznaczony do czyszczenia pilników z resztek tkanek pozostałych na powierzchni pilników (3).
5. Po wyjęciu pilnika z kanału korzeniowego, umieść go w trzecim pojemniku (3), (nie wyjmując pilnika z kątnicy) i włącz przycisk "on" mikrosilnika na około 10 sekund. W efekcie, ciecz w pojemniku zostanie wprawiona w ruch i większość tkanek przylegających do pilnika odzieli się od niego.
6. Następnie wyjmujemy pilnik z kątnicy i wkładamy kolejny potrzebny w dalszym etapie opracowania kanału.
7. Po skończonym zabiegu opracowania kanału korzeniowego wyrzucamy użyte pilniki Gentlefile.
8. Kolejno należy przepłukać wszystkie trzy pojemniki i umieścić je w autoklawie razem z ręcznymi pilnikami i pilnikami Gentlefile, które nie zostały użyte podczas zabiegu leczenia kanałowego. Podobnie postępujemy z trójkątną podstawką.