

Protokół pracy narzędziem wykończającym pracę w kanale Gentlefile-Brush

Cel:


Aktywacja płynów dezynfekujących i czyszczących ściany kanałów oraz dotarcie do nieregularnych przestrzeni w kanałach.

Funkcjonowanie:

Przy wysokich obrotach, stalowe nitki szczotki otwierają się i dopasowują do zmiennej średnicy kanału. Narzędzie oczyszcza kanał z pozostałych zanieczyszczeń w kanale i stanowi irygator w bliskim kontakcie z powierzchnią zębiny.

Protokół:

1. Opracować kanał, tak aby kanał był przygotowany do wypełniania.
2. Zalać kanał płynem do irygacji.
3. Włożyć narzędzie Gentlefile-Brush do kątnicy.
4. Zamocowane na mikrosilniku narzędzie Gentlefile-Brush, umieścić w kanale w okolicach wierzchołka.
Włączyć mikrosilnik i bardzo powoli wycofywać narzędzie Gentlefile-Brush z kanału.
5. Proces ten powinien trwać około 10-20 sekund.
6. Osuszyć kanał i wypełnić.

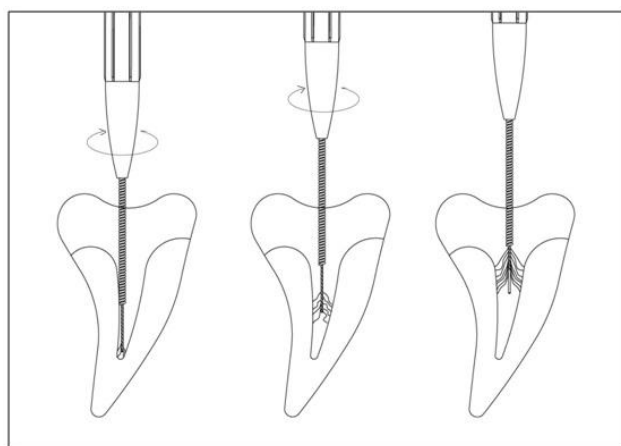

Uwaga!

Podczas pracy Gentlefile - Brush, nie należy zatrzymać ruchu wycofywania narzędzia z kanału. Podczas włączonego mikrosilnika i pracy narzędziem GF-Brush, nie wykonywać ruchów wkładania/wciskania go do kanału. Jeśli narzędzie GF-Brush pozostaje w jednym miejscu w kanale, istnieje ryzyko powstania stopnia.